

PROVTAGNINGSKIT

Innehåll: Lansett, pipett, provrör med extraktionslösning, streckkod, plåster samt ett returkuvert

Eget material: Servett



Steg 1 FÖRBEREDELSE

Läs hela instruktionen innan du börjar provtagningen.

Ta gärna provet på förmiddagen så du hinner posta samma dag.

TIPS Utför en lätt motion före provtagningen för att öka blodflödet

Läs hela instruktionen innan du börjar provtagningen.

Tvätta händerna med tvål och vatten, det hjälper också till att öka blodflödet. Fingret ska vara torrt före provtagning

Förberedelse.

Börja med att ställa fram allt du behöver.

Fingret från vilket blodet ska tas bör placeras så att handen är under hjärtat. (det ökar det venösa trycket). Massera handen och fingret försiktigt för att öka cirkulationen.

Steg 2 PROVTAGNING


Användning av lansetten.

1. Skruva av skyddet på lansetten
2. Placera den öppna delen av lansetten mot sidan av fingerspetsen
3. Aktivera lansetten genom att pressa på knappen. Ett klick hörs när lansetten aktiveras

Användning av Pipetten.

4. Torka bort den första droppen blod som kommer. Pressa sedan med jämt tryck. Pipetten suger själv upp blodet med kapillärkraft

OBS! Täck inte hålet i pistongens övre ände

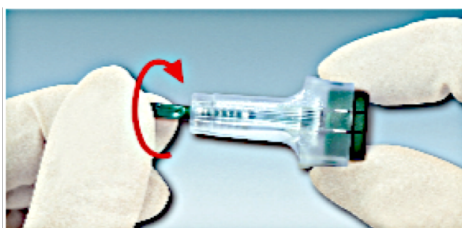

TIPS Om blodflödet stannar, torka av fingret med en ren servett och pressa igen



5. Pipetten hålls horisontalt mot fingret
6. Fortsätt till dess att pipetten fyllts ända upp till det vita filtret.
7. Töm blodet i röret. Genom att hålla pipettspetsen mot rörets insida. Täck för hålet på pistongens översida och pressa ut provet i vätskan.
8. Skurva på locket och **skaka kraftigt i 30 sek.**

Steg 3 PACKA OCH POSTA

Placera streckkoden på röret och sätt sedan röret tillbaka i förpackningen och lägg ner det i returkuvertet

Om möjligt posta kuvertet samma dag provet har tagits

Se också instruktionsvideon från Sarsted för provtagning

<https://www.youtube.com/watch?v=8EcEme2jtOg>

Art. nr. 12-07